



Das PowerLoc™-

Infusionsset darf NUR

zur automatischen

Injektion für eine

Computertomographie

verwendet werden, wenn

es zusammen mit einem

PowerPort™-Produkt

benutzt wird.

**Blutrückfluss
überprüfen und
spülen**

WARNHINWEIS:

Patienten nur zur


Computertomographie mit

automatischer Injektion

schicken, wenn der

Blutrückfluss überprüft

wurde.

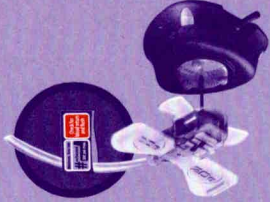

Nur wenn das Vorhandensein eines PowerPort™-
Produkts und der Blutrückfluss bestätigt sind,
darf der purpurfarbene Aufkleber für CT-
Identifizierungszwecke angebracht werden.

MRD
at-Karte

AO

RADAO

26368321

Krüger-Heintzen
Stefanie
4100304483 W

18.04.1979



A

Informative Website für Patienten: eifu.bd.com

Datum

18.08.26

Patienten-
Gesundheit



port
IMPLANT

Groshong®-Katheter mit

Deutsch

Der Zugang zum implantierten PowerPort™ muss bei einer Hochdruckinjektion über ein PowerLoc™ Sicherheitsinfusionsset erfolgen.

SPÜLMENGEN

- Port wird nicht verwendet:
5 mL sterile isotone Kochsalzlösung alle 4 Wochen
- Nach jeder Infusion von Medikamenten oder TPN-Lösungen:
10 mL sterile isotone Kochsalzlösung
- Nach der Blutentnahme:
20 mL sterile isotone Kochsalzlösung
- Nach Hochdruckinjektion von Kontrastmittel:
10 mL sterile isotone Kochsalzlösung

Durchflussraten der PowerLoc™-Punktionsnadel
Während Hochdruckinjektionen

Größe	19 G	20 G	22 G
Farbe	Cremer	Gelb	Schwarz
Max Flow Rate	5 mL/s	5 mL/s	2 mL/s
Max Pres. Setting	2068 kPa (300 psi)		

Bard, Groshong, PowerLoc, und PowerPort sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc.

Bard Access Systems, Inc.
605 North 5600 West

Salt Lake City, UT 84116 USA 801-522-5000
Hotline für klinische Informationen: 801-522-

www.bd.com, www.portready.com
© 2021 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

PowerPort™ isp M.R.I.™ Implantable Port with Suture Plugs

UDI-DI: (01)00801741098994

(17)271231

(10)RELN0703

8808560

RELN0703

2027-12-31



MR Conditional

2068 kPa (300 psi)



Die Abtastung der drei Punkte oben und der Dreiecksform der Sonde helfen bei der Identifizierung des Implantierbaren PowerPort™-Sonde für die automatische Infusion.